

JOËLETTE

Monteringsinstruktion

JOËLETTENS DELAR

- 1 centraldel (säte, ryggstöd, huvudstöd, bakre armar, hjul)
- 2 främre armar
- 1 fotstöd
- 2 kuddar (säte, rygg)
- 2 monteringsnycklar

STEG 1 – LOSSA BÄLTET (bild 1)

Om bältet är fastsatt över den ihopvikta joëletten, knäpp upp det.

STEG 2 – SÄTT HJULET PÅ PLATS (bild 2, 3)

Lossa säkerhetssprinten till den korta metallpinnen med svart knapp (som sitter vid hjulgaffelns bas). Dra ut pinnen (bild 2).

Lyft och vrid hjulet till dess rätta position. Säkra hjulet med hjälp av metallpinnen (bild 3). Sätt tillbaka säkerhetssprinten i pinnens ände.

STEG 3 – SÄTT FOTSTÖDET PÅ PLATS (bild 4, 5, 6, 7, 8)

Lossa säkerhetssprinten till fotstöds monteringspinne. Dra bort monteringspinnen (bild 4).

Se till att du spänner upp det svarta lilla handtaget på fotstödet, annars blir fotstödet svårt att få på plats (bild 5).

Sätt fotstödet på plats genom att passa in det i de två skåror (bild 6).

Sätt monteringspinnen på plats och sätt tillbaka säkerhetssprinten (bild 7 och 8).

Den lilla monteringsnyckeln reglerar fotplattornas motstånd. Det justeras genom att skruva åt, eller genom att lossa, de skruvar som sitter på vardera fotplattas yttersida.

STEG 4 – SKRUVA FRÄMRE ARMARNA PÅ PLATS (bild 9, 10, 11, 12)

Sätt säteslåset i horisontalläge (bild 9). Veckla ut joëletten (bildserie 10), delvis genom att trycka in det ena handtaget på bakarmarna, för att frigöra dessa (fjärde bilden i bildserie 10). Använd stora nyckeln för att skruva armarna på plats (bildserie 11/bild 12).

STEG 5 – SÄTT FAST KUDDARNA (bild 12)

Sätt säteskudden och ryggkudden på plats. Säteskudden fästs med de två knapparna som sitter i kuddens bakkant, in i knappfästena på ramen. Ryggkuddens stora flärp lyfts över "rygggramen" och fästs med hjälp av kardborre, längst ner på ryggkuddens baksida. Se bild 12 för kuddarnas position.

STEG 6 – FÄLL UT DE FRÄMRE ARMARNA (bild 13)

Fäll ut de främre armarna och sätt låssprintarna på plats (bild 13).

Joëletten är nu redo för äventyr!

FÖR ATT MONTERA ISÄR JOËLETTEN...

Följ steg 1-6, baklänges.

PACKA NER JOËLETTEN I TRANSPORTVÄSKAN (bild 14)

Packa joëlettens delar enligt bildserie 14.

JOËLETTE

Handhavande

ATT RESA JOËLETTEN TILL FÄRDLÄGE (bild 15, 16, 17, 18, 19)

Passageraren sitter fastspänd i joëletten (bild 15). Hjälms rekommenderas vid löpaktiviteter. Sätt säteslåset i vertikalläge (bild 16). **OBS! Bakre ledsagaren håller in bromshandtaget (beläget på den högra bakarmen) genom hela rörelsen till färdläge (bild 17/bild 18). Håll emot med foten mot hjulnavet vid behov (bildserie 19).**

OBS! MYCKET VIKTIGT! Före avfärd, kontrollbromsa för att säkerställa att sätet är låst över hjulet (sätet kommer annars "störta framåt").

ATT FÄLLA JOËLETTEN TILL PARKERINGSLÄGE (bild 20, 21)

Främre ledsagaren närmar sig passageraren från mellan de främre armarna till. Främre ledsagaren sätter säteslåset i horisontalläge (bild 9/bild 20). **OBS! Bakre ledsagaren håller in bromshandtaget (beläget på den högra bakarmen) genom hela rörelsen till parkeringsläge (bildserie 21).**

UNDER FÄRDEN


Justera de bakre armarnas höjd för att hitta en bra balans mellan främre och bakre ledsagare. De bakre armarna justeras genom att trycka in det vänstra handtaget på den vänstra bakre armen.

Bromsa i branta utförsbackar, eller vid paus i branta uppförsbackar.

God tur!

JOELETTE.SE



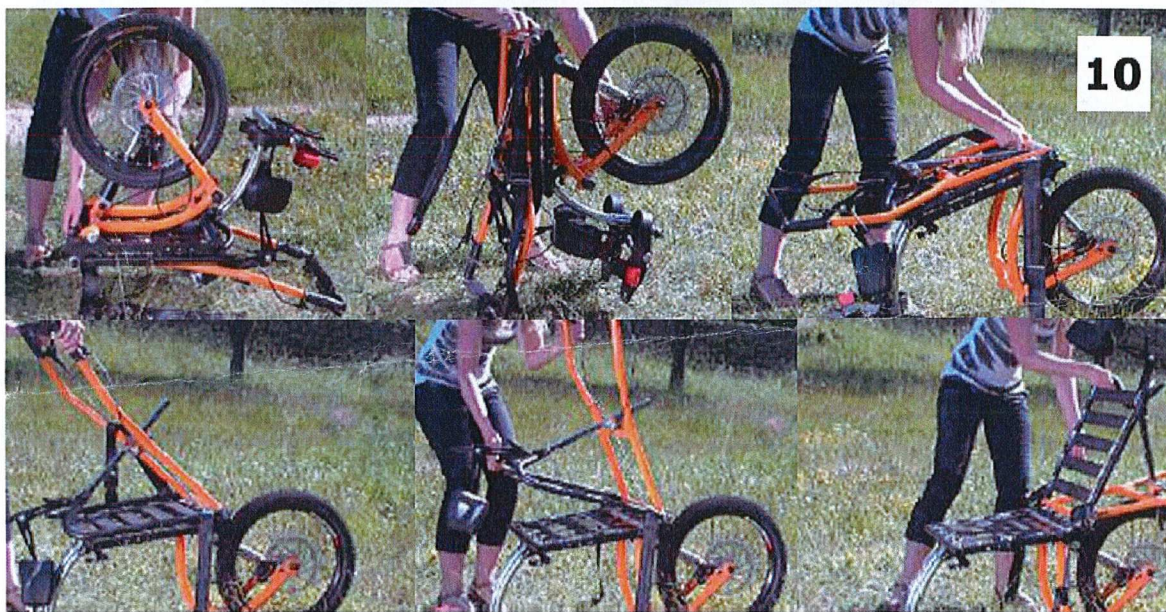



14



