



Zitzi
Zlider

Anatomic skridskokälke

Bruksanvisning

Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,
underhåll/skötsel



Denna bruksanvisningen avser skridskokälken Zitzi Zlider med tillbehör.
För fullständig översikt av tillbehör se produktens beställningblad.

Innehållsförteckning

Tillverkare	3
--------------------------	----------

Introduktion	3
---------------------------	----------

Inledning	3
-----------------	---

Korrespondens - märkning	3
--------------------------------	---

Säkerhetsföreskrifter	4
------------------------------------	----------

Varningar och försiktighetsåtgärder	4
---	---

Avsedda ändamål	5
------------------------------	----------

Körteknik	5
------------------------	----------

Monterings- och justeringsanvisningar	6
--	----------

Montering av sits	6
-------------------------	---

Höjjustering av sitsen	7
------------------------------	---

Vinkeljustering / tiltning av sitsen	7
--	---

Fotplatta	8
-----------------	---

Foder	9
-------------	---

Körbåge	10
---------------	----

Skridskomedar	11
---------------------	----

Skidor	12
--------------	----

Sammanfattning och efterkontroll	13
---	-----------

Underhåll och skötselanvisningar	13
---	-----------

Kontroll före användning	13
--------------------------------	----

Skötsel och tvättråd	14
----------------------------	----

Avfallshantering	14
-------------------------------	-----------

Garanti och retur	15
--------------------------------	-----------

Revision	15
-----------------------	-----------

Tillverkare

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadress	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Introduktion

Inledning

Grattis till valet av produkt. Vi hoppas att du kommer få stor användning av vår produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår hemsida: www.anatomicsitt.com. Revision finns på framsidan tillsammans med datumet.

Korrespondens - märkning

På produktetikett finns produktens artikelnummer samt serienummer. Dessa nummer ska anges vid korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna.

Säkerhetsföreskrifter

Varningar och försiktighetsåtgärder

-  Inställningar får endast utföras av vuxen person. Det är endast tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
-  Produkten får inte modifieras eller ändras på andra sätt än vad som anges i bruksanvisningen.
-  Produkten ska monteras och kontrolleras av vuxen före användning.
-  Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxen.
-  Använd alltid hjälm.
-  All åkning sker på egen risk.
-  Produkten får inte bogseras eller dras av ett fordon.
-  Håll fötter och händer på avsedd plats.
-  Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.
-  Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.
-  Utför aldrig inställningar medan produkten används.
-  Åk ej med löst hängade klädesplagg t.ex halsduk. Tänk på kvävningsrisken.
-  Instruktionen bör sparas i händelse av reklamation.
-  Akta fingarna så du inte får in dem under medarna vid körning.
-  Iakta försiktighet vid körning på isar i naturen som kan variera i tjocklek.
-  Innan all användning ska produkten kontrolleras och eventuella brister åtgärdas. Endast originaldelar från Anatomic Sitt får användas.
-  Tänk på att skidskomedarna är skarpa och kan åstadkomma skada vid transport och hantering.
-  Spänn inte fast dig vid kälken eller sitsen om du åker på naturis och riskerar att åka genom isen.



Var minst två personer i sällskap och tag alltid med säkerhetsutrustning för att klara dig om du skulle åka igenom isen.



Lyft inte i kälken med en person i sitsen.



Stå ej på de utstickande bakre ramrören.

Avsedda ändamål

Produkten är ett fritidshjälpmiddel som riktar sig till personer mellan 7 - 100 år.
Max belastningsvikt är 110 kg.

Körteknik

- Använd alltid lämpliga stavar vid egen körning.
- Försök hitta en bra stak teknik och balans så att fotbygeln inte slår i onödigt mycket i underlaget.
- Zlidern har ingen inbyggd broms utan stavar får användas för att bromsa och svänga kälken.
- Produkten kan framföras av annan person med hjälp av körbågen.

Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av vuxen person i enlighet med denna bruksanvisning.

Montering av sits

Montering av sits

Aktiv skate-sitsen monteras med fyra skruvförband (A).



Fästplattan i sitsen har fem olika fasta lägen/hål (B).

Sitsen kan dessutom justeras 7 cm med hjälp av spåren (C) i sittplåten.

Försök hitta en lämplig balans över skridskomedarna.

Dra åt skruvarna när du är nöjd med inställningen.

Sitsen kan utrustas med ett band som fästes runt körbågen för ökad stabilitet.

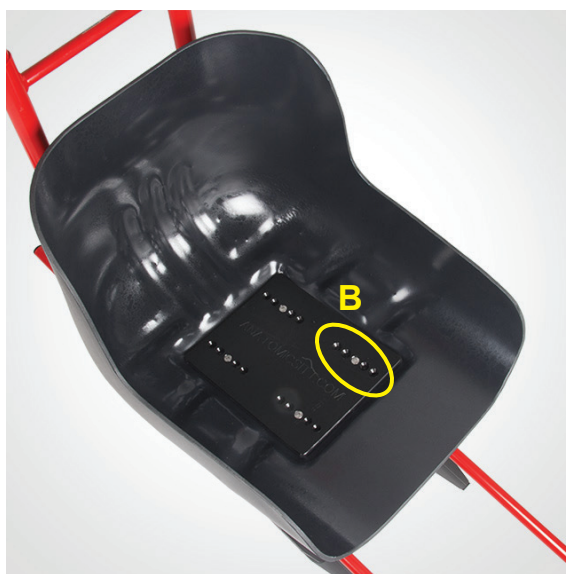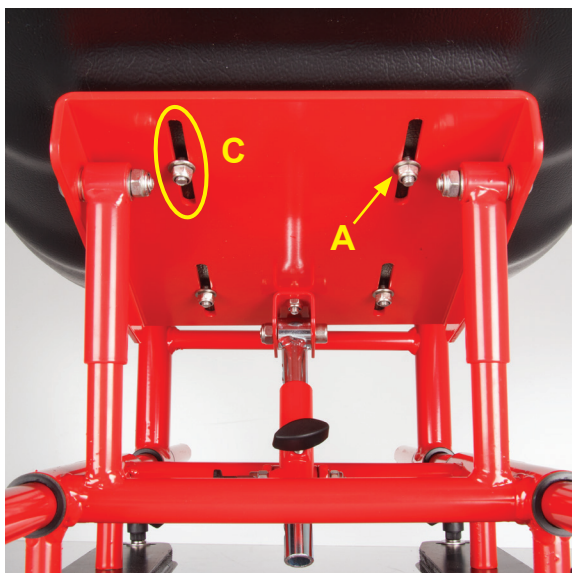

Tänk på att du inte hänger för tunga saker på körhandtaget så att kälken blir baktung.

Höjdjustering av sitsen


Sitsen kan höjdjusteras efter brukarens önskemål.

Lossa de båda insex-skruvarna (D) och lyft/sänk sitplattan till önskad höjd.

Skruva in skruvarna i lämpligt hål.



Justering får ej göras med användare i sitsen.

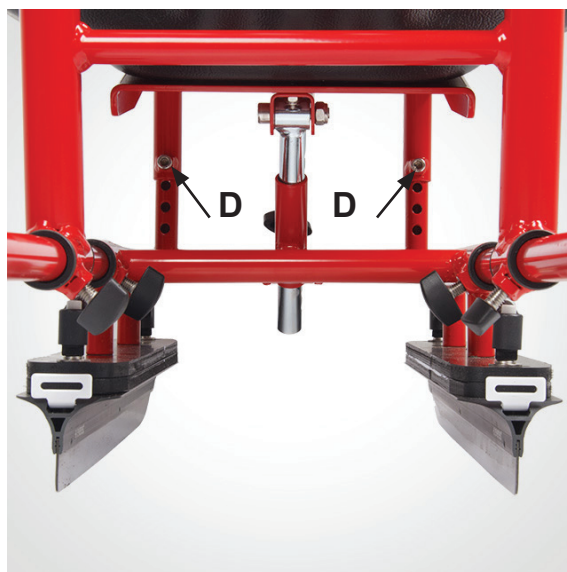


Vinkeljustering / tiltning av sitsen

Sitsen kan vinkeljusteras mellan -13° till $+23^{\circ}$.

Lossa fingervredet (E) och dra ut låspinnen (F). Vinkla sitsen till önskat läge och se till att låspinnen passar i ett av hålen. Dra åt fingervredet (E).



Justering får ej göras med användare i sitsen.

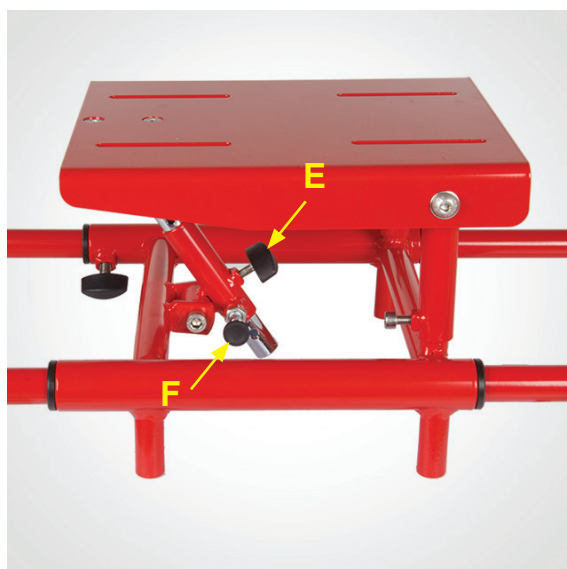

Fotplatta

Inställning

Justera in längden från sitsen till fotplattan genom att lossa fingervreden (A) och skjut sittdelen för önskat avstånd till fotplattan. Dra åt vreden.

Montering av fotplatta


Pressa fast fotplattan på ramröret och montera skruvförbanden (B).

Montering av fotband

Ett fotband kan träs genom skårorna (C) och spänns över fötterna.



Om avståndet mellan sitsen och fotplattan är kort så kan de utstickande bakre ramrören kortas. Lämna dock minst 10 cm bakom körbågen.

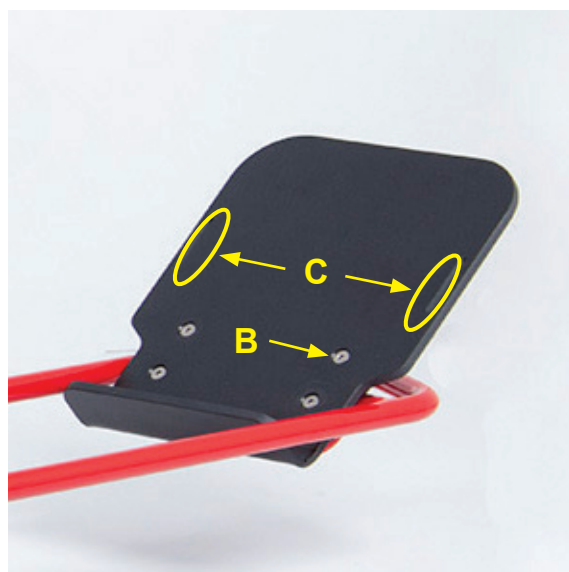

Foder

Sitsen är alltid utrustad med två foder som standard, Sitsen kan användas med ett eller två foder efter behov.



Iläggsfoder

Tryckavlastande foder av Mesh som kan placeras närmast kroppen eller under foder i sitsen beroende på önskemål.



Körbåge

Montering


Körbågen skjuts på ramrören bakom sittenhetsen. Skjut fram körbågen mot sitsen och dra åt de båda fingervreden (A).

Höjdjustering

Lossa de båda fingervreden (B).
Justera upp handtagen till önskad höjd.
Dra därefter åt fingervreden.



Övre delen av körbågen måste gå ner i röret minst 5 cm under fingervredet (B).

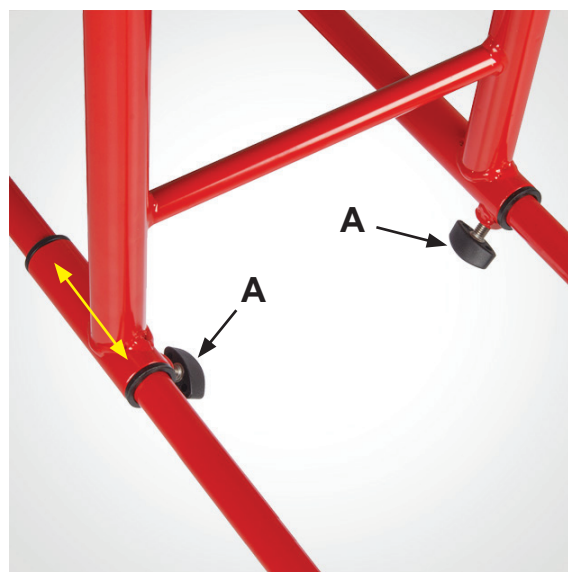

Skridskoskenor

Montering

Adaptorn består av två plattor och en skruvsats för montering på ramen och skridskoskenan.

Montera den undre adapterplattan med två skruvar (C) i respektive skridskoskenor.

Montera den övre adapterplattan med skruvar (D) i de gängade rören.


Montera därefter ihop adapterplattorna med bricka (F), fjäderbricka (G) och spakvred (H).

Övre adapterplattan har tre uppsättningar hål (E) i sidled för smalare eller bredare montering. Välj position efter användaren och tänk på balanspunkten.

Tänk på att montera plattan i samma position så inte skenan står snett.



Kontrollera att skridskoskenorna är ordentligt monterade före användning.

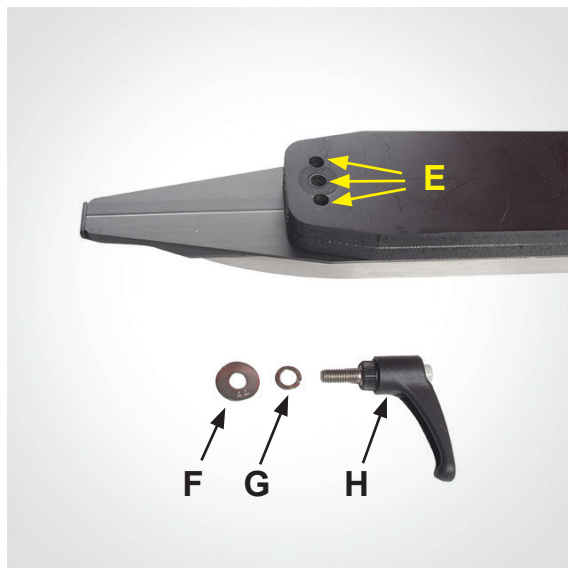

Skidor

Montering

Adaptern består av två plattor och en skruvsats för montering på ramen.

Beroende på skidans beskaffenhet så ska skidleverantörens anvisningar och skruvar användas. Skruvar ska väljas utifrån att adapterplattan är 10 mm tjock.

Mät upp och borra skruvhål (A) i skidan utifrån var du vill ha balansen på skidan. Montera den undre adapterplattan med två skruvar (B) i respektive skida.

Monter den övre adapterplattan med skruvar C i de gängade rören.


Montera därefter ihop adapterplattorna med bricka (E), fjäderbricka (F) och spakvred (G).

Övre adapterplattan har tre uppsättningar hål (D) med 1 cm mellanrum i sidled för smalare eller bredare montering. Detta ger olika spårbredd för skidspåret 21 - 25 cm.

Tänk på att montera plattan i samma hålpär så inte skidan står snett.



Adapter

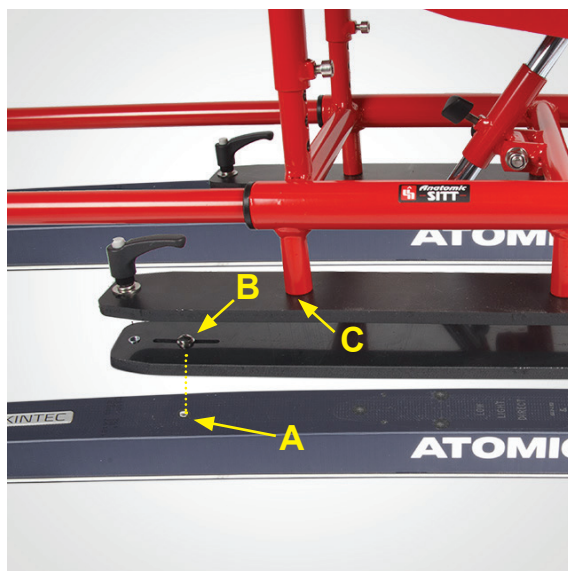

Sammanfattning och efterkontroll

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att användaren har en korrekt sittposition.

Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska samtliga vred, infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Underhåll och skötselanvisningar

Kontroll före användning

För att produkten ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet.
- Kontrollera produktens stabilitet.
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis sitstilt avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera ev. bälten avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Skötsel och tvättråd

Lyft ur foder efter användning så att dessa kan torka. Plasten tvättas med svamp eller mjuk borste. Du kan använda milt tvättmedel eller desinfektionsmedel om det behövs.

Foder

Vi rekommenderar handtvätt (max 60°) om fodret inte är för smutsigt, då detta förlänger fodrets livslängd. Du kan då använda en mjuk tvättsvamp.

Fodren skall torka i rumstemperatur, eller i torkskåp på låg temperatur, och får inte placeras direkt mot en värmekälla. De får inte torkas i torktumlare, då kan de förlora formen.

För höftbälten och iläggsfoder från Anatomic Sitt AB, följ rekommendationer på fastsydda tvättråd se symbolförklaring nedan.

Tvättsymboler



Handtvätt



Maskinvätt 60°C



Ej klorblekning



Får ej torktumlas



Får ej strykas



Ej kemtvätt

Avfallshantering

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska separeras efter materialtyp och lämnas på lokal återvinningsstation.

Garanti

Garanti och reklamation

Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum eller enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedömma reklamationen ska produkten vara torr och rengjord när den skickas åter.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts.

Skidor tillagt sid. 12

Revisionsförteckning

Rev. 1 - 2021-12-13

SE

Anatomic Sitt AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

